




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

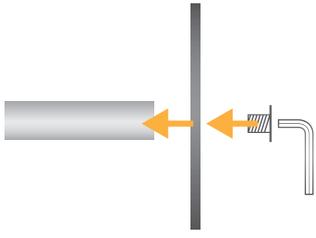

1. Avvitare la base al palo con chiave a brugola in dotazione
Nota - serrare bene la vite

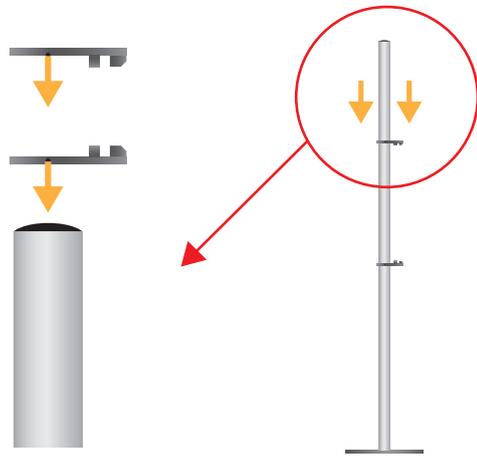


2. Inserire i due anelli rivolti specularmente come da disegno.

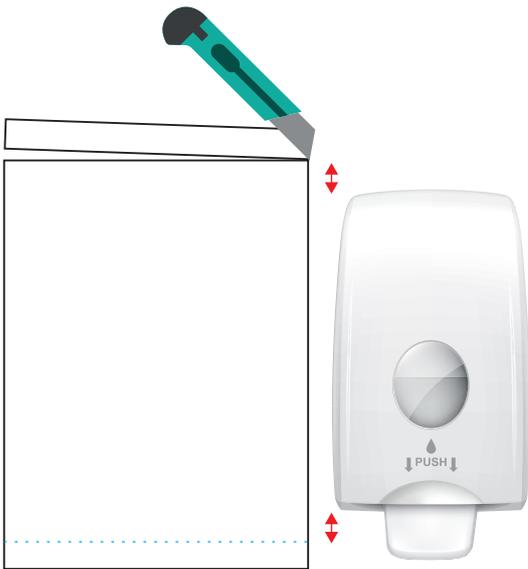

3. Tagliare mediante cutter e righello, il pannellino in dotazione per abbinarlo alle misure del vostro dispenser
Nota - circa 4 cm più lungo



4. Applicare il velcro dual lock sul retro del dispenser e sul pannellino

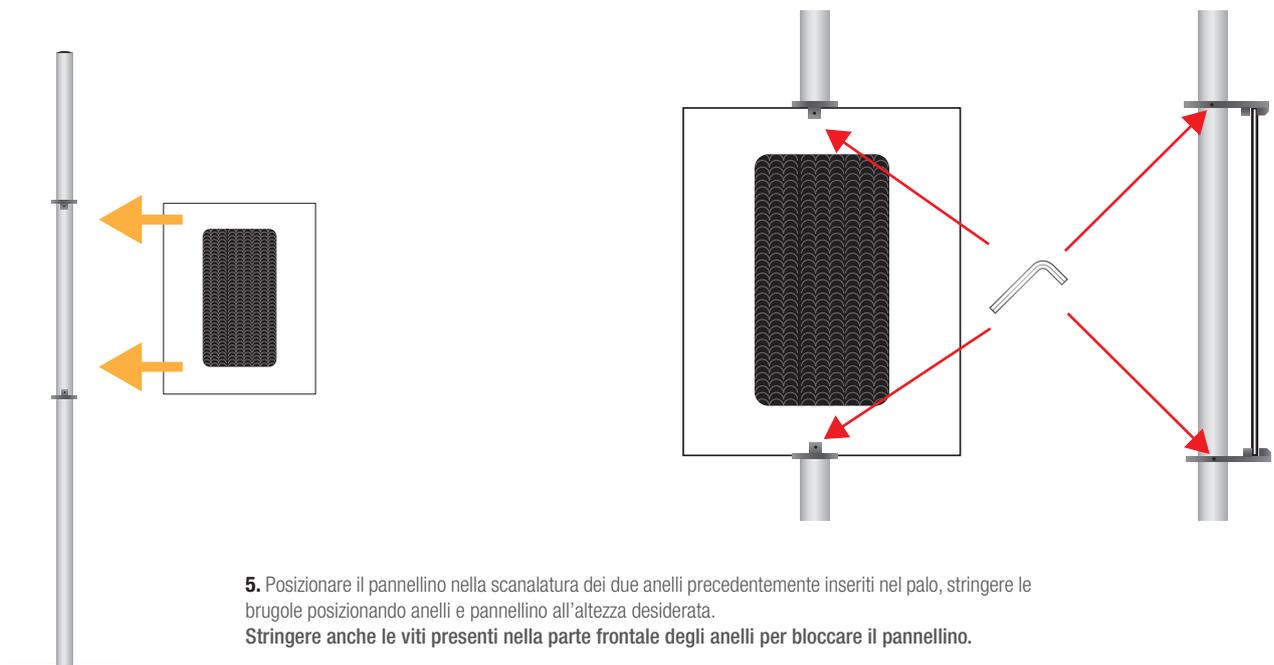


5. Posizionare il pannellino nella scanalatura dei due anelli precedentemente inseriti nel palo, stringere le brugole posizionando anelli e pannellino all'altezza desiderata.
Stringere anche le viti presenti nella parte frontale degli anelli per bloccare il pannellino.


OPTIONAL per DNA dispenser




6. Far aderire il dispenser mediante velcro dual lock

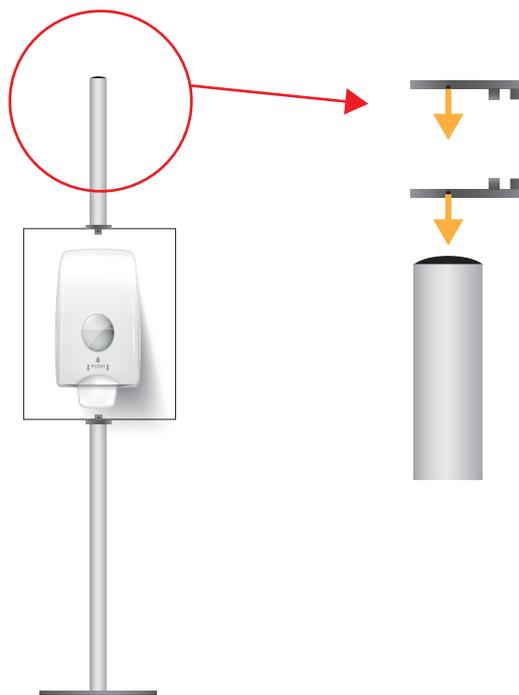

7. Inserire i due anelli rivolti specularmente come effettuato in precedenza

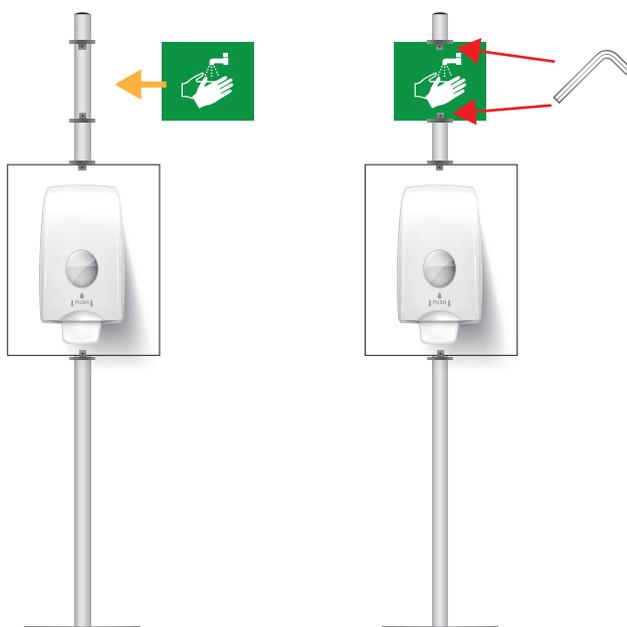

8. Posizionare il pannellino nella scanalatura dei due anelli precedentemente inseriti nel palo, stringere le brugole posizionando anelli all'altezza desiderata.

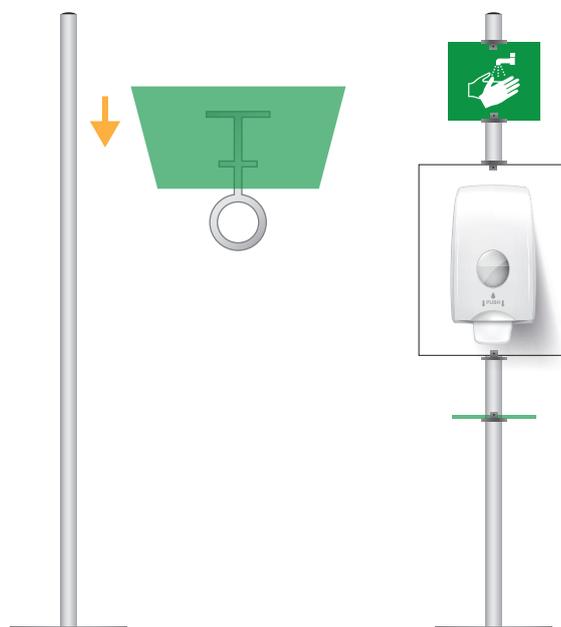

9. Avvitare il ripiano trapezoidale in plex trasparente al relativo telaio metallico mediante le viti a doppia testa fornite. Inserilo nel palo come prima cosa, in modo da trovarlo al di sotto dei due anelli con pannellino reggi dispenser.