

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>SEDILI PER VASCA CON GAMBE PIEGHEVOLI</p>	<p>Rev 00</p> <p>Aprile 2012</p>
--	--	----------------------------------

Codice	Descrizione
AB-15/60	Sedile per vasca con gambe pieghevoli 60 x 30 cm
AB-15/75	Sedile per vasca con gambe pieghevoli 75 x 30 cm

Descrizione ed indicazioni

Sedili per vasca con sedute di tre diverse lunghezze realizzate in ABS con spazi longitudinali per il deflusso dell'acqua. Struttura in alluminio anodizzato con gambe pieghevoli e regolabili ad otto differenti livelli d'altezza dotate di piedini in gomma antiscivolo. Braccioli estraibili e ribaltabili con appoggi per avambraccio in poliuretano morbido.

I dispositivi sono destinati ad individui con difficoltà motorie onde favorire le quotidiane attività di cura ed igiene personale.

Precauzioni d'impiego

I sedili sono stati pensati per essere utilizzati a cavallo del bordo vasca per favorire le quotidiane attività di cura ed igiene personale di individui con difficoltà motorie. In particolare, agevolano le operazioni di entrata ed uscita dalla vasca. Date le particolari condizioni d'impiego, è necessario regolare a differenti livelli d'altezza le coppie di gambe laterali. Naturalmente, la coppia di gambe posizionata all'interno della vasca dovrà essere regolata ad un'altezza inferiore rispetto alla coppia posizionata all'esterno e comunque in modo tale che il piano di seduta risulti in orizzontale.

Prima dell'utilizzo, verificare sempre lo stabile posizionamento del dispositivo a cavallo del bordo vasca, l'adeguata regolazione in altezza ed il corretto posizionamento delle clip di fissaggio per la regolazione in altezza e l'apertura/chiusura delle gambe. Controllare periodicamente la condizione dei piedini antiscivolo in gomma e procedere, se del caso, alla loro sostituzione. Accertarsi del corretto fissaggio dei braccioli. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità motorie. Attenersi ai limiti di portata massima.

Caratteristiche

Facilità di posizionamento.

Seduta ergonomica con spazi per il deflusso dell'acqua.

Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Struttura e braccioli **alluminio anodizzato**
Seduta **ABS**
Puntali **gomma antiscivolo**

Dati tecnici

Dimensioni seduta

AB-15/60 **60 x 30 cm**
AB-15/75 **75 x 30 cm**

Regolazione altezza

da 36,5 a 54,5 cm

Portata

135 kg

Pulizia

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**SEDILI PER VASCA
CON GAMBE PIEGHEVOLI****Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione AB-15/60: 600207

Progressivo di registrazione AB-15/75: 600214

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

