

KIT ANTIDECUBITO *GEMINI II PLUS* PER PAZIENTI BARIATRICI **Ref. AK-406P**



Descrizione

Sistema antidecubito *Gemini II Plus* per pazienti bariatrici, appositamente progettato per offrire comfort e prevenzione alle persone in condizioni di obesità o sovrappeso.

Questo sistema è composto da un materasso a 20+1 elementi intercambiabili in Nylon/TPU con tubi di connessione a 3 vie e valvola CPR, una base in Nylon/PVC, una fodera bielastica in Nylon/PU con cerniera, un compressore a regolazione digitale della pressione, con possibilità di impostare diverse funzioni per ottenere un'efficace prevenzione secondo le esigenze del paziente.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti in condizioni di obesità e sovrappeso allettati, allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di contatto del corpo.

Sistema utilizzabile in ospedale, incluso l'ambiente di terapia intensiva, case di riposo e assistenza domiciliare.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Assemblato	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	121449/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche – Materasso AK-406PM


Dimensioni	200 cm x 120 cm x 26 cm
Materiali	Elementi in Nylon/TPU. Base in Nylon/PVC 840D. Fodera in Nylon/PU.
Numero elementi	20+1
Valvola di sgonfiaggio	CPR
Funzione cuscino	Si
Tipologia connettori	CPC a 3 vie
Portata massima	400 kg
Fodera	Bielastica con cerniera – colore blu

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche – Compressore AK-406C

Dimensioni	34 cm x 12,5 cm x 24,4 cm
Peso	3,5 kg
Materiale	Scocca in ABS ritardante di fiamma
Alimentazione	220 V / 50 Hz , 1 A
Flusso d'aria	12 l/min
Range di pressione	20 mmHg – 65 mmHg
Ciclo di lavoro	10/15/20/25 minuti
Modalità funzionamento	- Alternata - Statica - Massimo gonfiaggio statico - Seduta
Impostazione allarme	- Bassa pressione - Interruzione corrente - Modalità alternata

Funzioni compressore

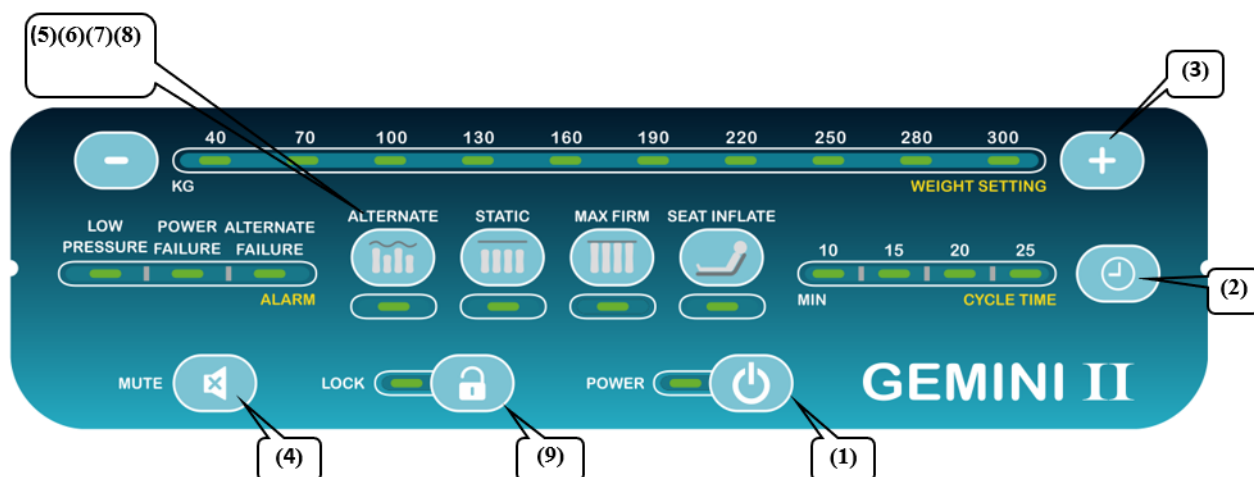

Tasto accensione (1)



Modalità statica (6)



Impostazione ciclo alternato (2)



Modalità massimo gonfiaggio statico (7)



Impostazione pressione gonfiaggio (3)



Modalità seduta (8)



Tasto spegnimento allarme (4)



Pulsante di blocco (9)



Modalità alternata (5)

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del kit e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-406P	Kit antidecubito <i>Gemini II Plus</i> per pazienti bariatrici, con materasso a 20+1 elementi, tubi a 3 vie, fodera e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

