

La nuova famiglia **PARI BOY® S**

**Terapia di Inalazione – Realizzato
per le necessità individuali**



La famiglia di compressori PARI BOY S è stata adattata per andare incontro alle necessità individuali dei pazienti. Forniscono la giusta qualità di aerosol a secondo dell'obiettivo del trattamento e della fascia d'età dei pazienti.

PARI TurboBOY® S

Specialisti dell' inalazione efficace



Quanto piccolo secondo le necessità, il più personale possibile

Per anni, PARI ha fornito le giuste soluzioni a pazienti con disturbi respiratori grazie ad apparecchi di inalazione efficienti e affidabili. Utilizzando idee innovative ed avanzate tecnologie di produzione, abbiamo migliorato notevolmente la famiglia dei prodotti PARI BOY. Gli apparecchi per l'inalazione PARI BOY S sono rivolti ad uno scopo preciso e sono perciò creati per soddisfare i requisiti di un gruppo d'età definita o un target particolare di polmoni. Ad esempio, le piccole vie d'aria dei neonati richiedono una gamma di goccioline più piccole rispetto a quelle degli adulti. Alcuni farmaci sono più efficaci se depositati nelle regioni periferiche dei polmoni, altri in quelle centrali. I compressori della famiglia PARI BOY S vengono forniti con il nuovo nebulizzatore PARI LC SPRINT, assicurando così ottime possibilità di un trattamento di successo dei disturbi delle vie aeree inferiori (come ad esempio, asma, bronchite, malattie polmonari ostruttive e fibrosi cistiche).



PARI JuniorBOY® S

Piccole "goccioline" per piccole vie aeree

- Dispositivo per l'inalazione progettato per il trattamento del tratto respiratorio inferiore, appropriato per i bambini
- Idealmente equipaggiato (maschera e raccordo angolato BABY) per bambini da un mese in avanti
- Il nuovo nebulizzatore **PARI LC SPRINT® Junior** fornisce uno spettro di aerosol molto fine, adatto per le piccolissime vie aeree dei bambini
- Boccaglio per i bambini dai tre anni in avanti

Accessori:

Compressore **PARI BOY® S** con nebulizzatore **PARI LC SPRINT® Junior** (inserto giallo) con tubo di collegamento esteso (2.2 m), boccaglio, raccordo BABY e maschera BABY (misura 2)

Caratteristiche Aerosol:

Quantità erogata (Total Output Rate – TOR): 320 mg/min
MMD (Diametro Massa Mediana): 2,9 µm**
Percentuale della Massa inferiore a 5 µm: 76%

Dati Tecnici Compressore:

Pressione: 1.2 bar
Connessione elettrica: 230V, 50 Hz, 0.5A, 60W
Peso: 1.25 kg
Dimensioni: 18 cm x 11.5 cm x 16 cm
Garanzia: 3 anni



PARI TurboBOY® S

Per pazienti con età maggiore di 4 anni

- Dispositivo per l'inalazione progettato per il trattamento del tratto respiratorio inferiore, appropriato per i pazienti dai quattro anni in avanti
- Il nuovo nebulizzatore **PARI LC SPRINT®** assicura l'efficienza di deposito nei polmoni e corrispondenti periodi di inalazioni molto brevi
- Di facile utilizzo, persino i bambini possono utilizzarlo da soli

Accessori:

Compressore **PARI BOY® S** con nebulizzatore **PARI LC SPRINT®** (inserto blu) con tubo di collegamento, boccaglio e maschera

Caratteristiche Aerosol:

Quantità erogata (Total Output Rate – TOR): 500 mg/min
MMD (Diametro Massa Mediana): 3,5 µm*
Percentuale della Massa inferiore a 5 µm: 68%

Dati Tecnici Compressore:

Pressione: 1.2 bar
Connessione elettrica: 230V, 50 Hz, 0.5A, 60W
Peso: 1.25 kg
Dimensioni: 18 cm x 11.5 cm x 16 cm
Garanzia: 3 anni



PARI BOY® SX

Il Classico – veloce ed adattabile

- Dispositivo per l'inalazione con accessori aggiuntivi per il trattamento del tratto respiratorio inferiore, appropriato per i pazienti dai quattro anni in avanti e la famiglia
- Il nuovo nebulizzatore **PARI LC SPRINT®** accorcia notevolmente i periodi di inalazione
- Lo spettro selezionabile per l'aerosol abilita l'utilizzo mirato per le aree polmonari centrali o periferiche
- Distribuzione efficiente del farmaco con nebulizzazione intermittente opzionale

Accessori:

Compressore **PARI BOY® SX** con nebulizzatore **PARI LC SPRINT®** (inserto blu) con inserto aggiuntivo rosso per le goccioline più sottili, interruttore LC per la nebulizzazione intermittente, tubo di collegamento, boccaglio e maschera

Caratteristiche Aerosol:

Inserto blu:

Quantità erogata (Total Output Rate – TOR): 590 mg/min
MMD (Diametro Massa Mediana): 2,9 µm*
Percentuale della Massa inferiore a 5 µm: 75%

Inserto rosso:

Quantità erogata (Total Output Rate – TOR): 450 mg/min
MMD (Diametro Massa Mediana): 2,2 µm*
Percentuale della Massa inferiore a 5 µm: 89%

Dati Tecnici Compressore:

Pressione: 1.5 bar
Connessione elettrica: 230V, 50 Hz, 0.7A, 80W
Peso: 1.7 kg
Dimensioni: 19.2cm x 14.5 cm x 15cm
Garanzia: 4 anni

* Misurato con il Malvern MasterSizer X a 23°C e 50% di umidità relativa. Media Nebulizzata: 0.9% NaCl (5ml). Flusso inspiratorio 20 l/min.


** Misurato con il Malvern MasterSizer X a 23°C e 50% di umidità relativa. Media Nebulizzata: 0.9% NaCl (5ml). Flusso inspiratorio 12 l/min.



Tecnologia migliorata di nebulizzazione che assicura periodi di inalazione più brevi

La dose di farmaco respirabile somministrata (o "RDDR" da Respirable Drug Delivery Rate), misura la quantità di medicinale che si può depositare sui polmoni in un determinato periodo di tempo. Questa misura permette la valutazione oggettiva del funzionamento del sistema di inalazione.

Lo schema di seguito mostra i dati RDDR per diversi sistemi di inalazione. Ad esempio, se si compara il compressore **PARI BOY® SX** (■) con il sistema di inalazione B (■), è evidente che il valore RDDR del sistema di inalazione di PARI è tre volte più alto. In termini pratici, questo significa che il **PARI BOY® SX** permette un periodo di inalazione di 3 volte minore per somministrare la stessa quantità di sostanza attiva ai polmoni del paziente. Questo è di importanza critica per il paziente, in quanto la durata del trattamento è direttamente collegata all'efficacia della terapia farmacologica prescritta.

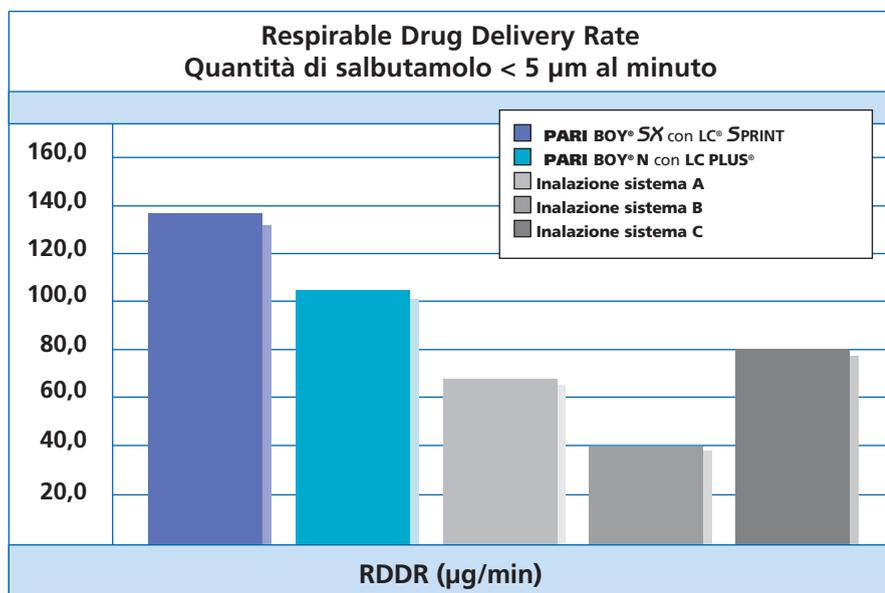

Il nuovo nebulizzatore **PARI LC® SPRINT** riduce il tempo di inalazione fino al 20%, in confronto ai nebulizzatori **PARI LC PLUS®**!

ConvinceteVi personalmente della qualità dei nostri prodotti!
Per suggerimenti e domande telefonateci:

PARI Service Centre: 0049 (0) 8151 / 279-220
www.pari.de · E-Mail: info@pari.de

PARI Export Service Center



0049 (0) 8151 279-220

Telefonateci...



.....se avete domande sull'impiego, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione del Vostro apparecchio di inalazioni **PARI**.



.....se necessitate informazioni riguardo accessori di ricambio per **prodotti PARI** attuali o per modelli più vecchi o per sapere dove poter acquistare questi accessori.



.....se necessitate di ulteriori informazioni o se avete domande relative alla serie di **prodotti PARI**.



PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg
Telefon +49 (0) 8151 279-0
Fax +49 (0) 8151 279-101



Trovate la **PARI** in internet all'indirizzo:
www.pari.de
E-Mail: info@pari.de

Specialisti dell' inalazione efficace

