

Clario



MOBILITÀ ED AFFIDABILITÀ



Aspiratore per vie respiratorie Clario

Clario

Semplice da usare, leggero da trasportare

Il personale per l'assistenza respiratoria domiciliare e i pazienti che necessitano di aspirazione delle vie respiratorie apprezzano l'aspiratore Clario per il suo design intelligente.

Il design modulare di **Clario** consiste di 3 parti principali per un montaggio semplice e senza complicazioni:

- Unità motore
- Contenitore
- Camera di sicurezza

Clario ha 3 livelli di vuoto preimpostati che ne facilitano la gestione.

Clario è molto igienico, dato che nessuna secrezione può entrare nell'aspiratore; la pulizia quotidiana è quindi semplice.

Clario è sempre pronto per essere utilizzato.

La leggerezza di **Clario** ne consente il trasporto ovunque. Clario è disponibile in versione a batteria per una maggiore mobilità.



- a** Il galleggiante previene le fuoriuscite di liquido
- b** Tappi per un trasporto sicuro
- c** Contenitore da 0,5 L
- d** Regolatore del vuoto
- e** Camera di sicurezza
- f** LED indicante lo stato della batteria
- g** Maniglia per il trasporto

Elevata mobilità ed alta affidabilità

Clario combina design intelligente e semplicità d'uso. È composto da 3 soli elementi che possono essere montati in un attimo.

Il tubo per l'aspirazione si collega al coperchio del contenitore per una semplice gestione dello stesso. Clario offre 3 impostazioni di vuoto, semplici da impostare e da spiegare. Un display a LED sulla versione AC/DC indica quando è necessario caricare la batteria. Tutte queste caratteristiche si sommano ad un design accattivante e discreto e ad un livello di rumore sorprendentemente basso.



Facile da usare

Design igienico superiore

Clario ha un design igienico superiore. Il galleggiante previene le fuoriuscite di liquido. La camera di sicurezza raccoglie le secrezioni in caso venga dimenticato il galleggiante. Infine, la membrana impedisce a qualsiasi secrezione di entrare nell'aspiratore. Queste misure garantiscono che non ci siano fuoriuscite nelle parti meccaniche dell'aspiratore. Non è necessario aprire il dispositivo per la pulizia e non servono filtri. L'aspiratore è molto semplice da pulire per aiutare a prevenire la contaminazione crociata tra pazienti.



Facile da pulire

Compatto e portatile

Clario offre una maggiore libertà all'utente. La versione a batteria, che pesa solo 2 kg, consente più di 50 minuti di aspirazione prima della ricarica. La borsa opzionale per il trasporto di Clario e dei suoi componenti rende il trasporto comodo e discreto.



Semplice da trasportare

Alcuni dettagli

- Medela offre al personale sanitario 50 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto medicale.
- Il nostro processo di sviluppo e produzione garantisce precisione medica e prestazioni eccellenti.
- L'affidabilità e la semplicità d'uso di Clario lo rendono particolarmente apprezzato e adatto per l'uso domiciliare.
- Clario offre un design sempre moderno. Non sembra un classico dispositivo medico.
- Clario è fortemente raccomandato dal personale per l'assistenza respiratoria domiciliare.
- La pulizia di Clario richiede poco tempo e pochi sforzi.
- Il design igienico avanzato di Clario aiuta ad eliminare la contaminazione crociata.
- Clario aumenta la mobilità, migliorando la qualità di vita del paziente.
- Garanzia di 2 anni sul dispositivo, di 6 mesi sulla batteria.

Accessori

Cavo

per collegamento
all'automobile 12 VCC
per l'utilizzo in auto.



Manometro

per controllare le
impostazioni del vuoto.



Borsa

per un trasporto semplice
e discreto.



Utilizzare gli accessori Medela per una
maggiore flessibilità e semplicità d'uso.

Dati tecnici

 vacuum	min. -18 kPa med. -36 kPa max. -80 kPa	-131 mmHg -266 mmHg -595 mmHg
 flow	low flow 15 L/min.	
	Power 100 - 240 V 50 - 60 Hz	

 kg	AC AC/DC	1,7 kg 2,0 kg
	H x W x D 223 x 255 x 95 mm	

 §	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEC), IIa 2 years warranty	 0123
		

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

**Per maggiori dettagli vogliate contattarci
direttamente o rivolgervi al rappresentante
Medela nel vostro Paese.**

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Contatto locale:

Medela Italia Srl
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch