

Dominant Flex



IL POTERE DI SCEGLIERE



Dominant Flex – Pompa di aspirazione chirurgica

Dominant Flex

La prima pompa di aspirazione Medela con portata selezionabile

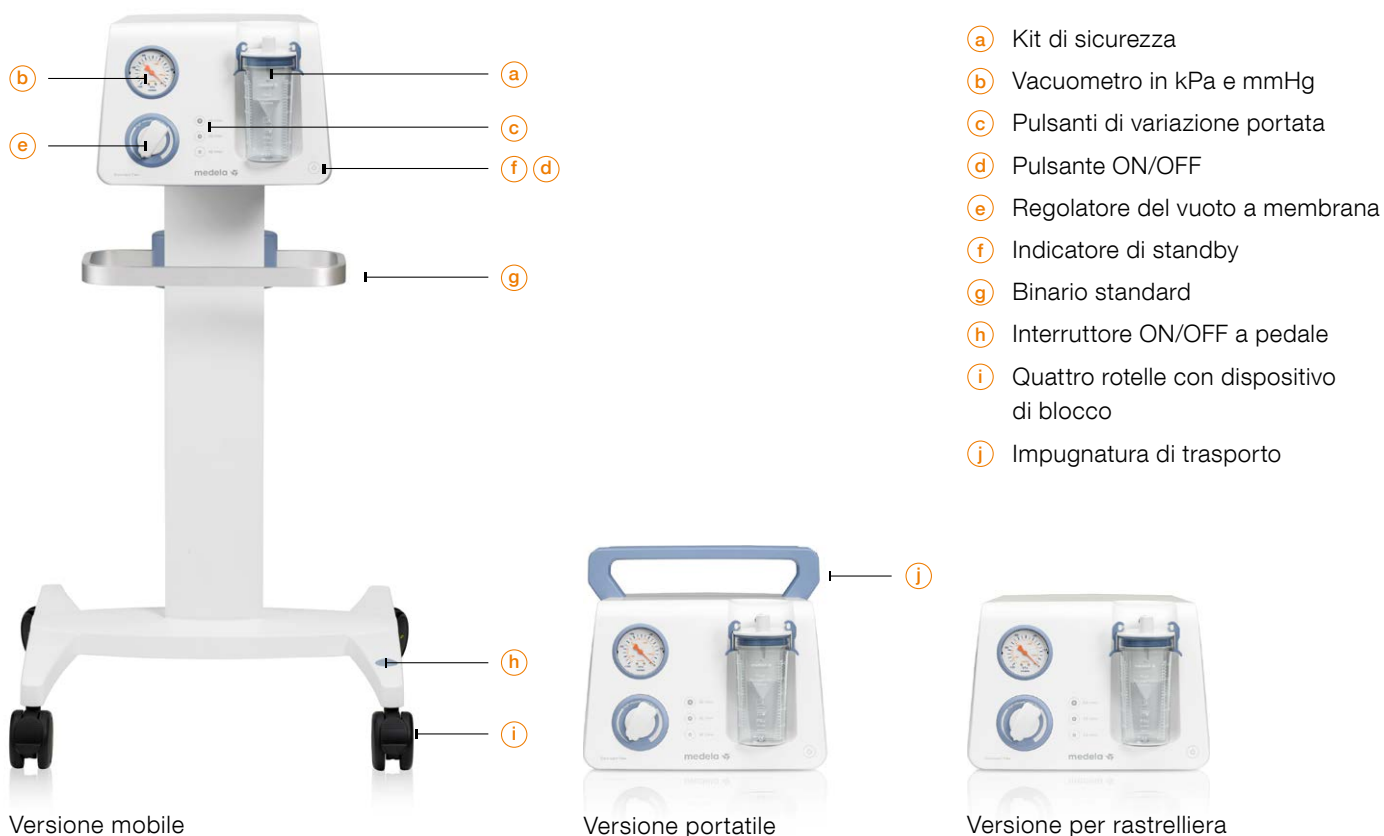
Aspirazione semplice e affidabile in modo igienico. Le pompe di aspirazione Dominant Flex possono essere utilizzate per l'aspirazione generica o come backup dell'aspirazione a parete per le seguenti applicazioni in ospedali, centri di chirurgia ambulatoriale, cliniche e ambulatori: chirurgia generale, liposuzione, endoscopia, aspirazione delle vie aeree, neurochirurgia e drenaggio delle ferite.

Scegliete la vostra portata. Non occorre più cambiare pompa quando occorre una diversa portata. La modalità di funzionamento standard di Dominant Flex è a 50 l/min. Quando occorre creare il vuoto più velocemente, è sufficiente toccare il pulsante CleanTouch per avere 60 l/min. Per le operazioni delicate in cui il minimo rumore è determinante, basta toccare il tasto dei 40 l/min per ridurre il livello di rumore.

Scegliete l'affidabilità. Il nostro processo di sviluppo di nuove pompe prende sempre in considerazione le esigenze dei clienti. Medela utilizza materiali resistenti, collauda ripetutamente nuovi progetti e implementa soluzioni ingegneristiche intelligenti per continuare la sua tradizione di pompe di lunga durata e di alta qualità.

Scegliete la vostra protezione igienica. Il design dell'involucro pompa di Dominant Flex, i pulsanti CleanTouch e la posizione dei suoi elementi di comando sono tutti fattori che contribuiscono a ridurre il tempo necessario per la pulizia. Per ulteriore protezione, è possibile scegliere tra una vasta gamma di filtri. I nostri sistemi di raccolta dei fluidi forniscono protezione integrata.

Una scelta semplice. Il nostro team di esperti ha saputo unire l'ingegneria intelligente e il funzionamento semplice. La struttura interna di Dominant Flex riduce la manutenzione. Il funzionamento a singolo tocco è intuitivo e semplice, con LED che indicano la modalità attiva.



Il potere di scegliere

Ora con Dominant Flex potete essere flessibili ed eseguire più applicazioni con una sola pompa. La portata standard di 50 l/min è un punto di partenza ideale per la maggior parte delle procedure. Se occorre creare il vuoto più velocemente, un semplice tocco sul pulsante dei 60 l/min porta la pompa di aspirazione in modalità turbo. Un tocco sul pulsante dei 40 l/min permette di avere immediatamente un funzionamento silenzioso.

Affidabilità svizzera

Medela mantiene le promesse del marchio "Made in Switzerland". Abbiamo applicato i nostri 50 e più anni di esperienza nel vuoto per uso medico al fine di creare un'unità di azionamento a pistone/cilindro moderna. Il materiale high-tech termoresistente offre un funzionamento prolungato e affidabile. La tecnologia brevettata e la struttura intelligente consentono una minore manutenzione.

Molto igienica

I materiali di alta qualità dell'involucro resistono ai disinfettanti più potenti e la cappa liscia monopezzo facilita la pulizia. La tecnologia CleanTouch sui tasti ON/OFF e di variazione di portata funziona con un solo tocco, senza incavi o scanalature. Il funzionamento a mani libere della pompa è possibile tramite l'interruttore ON/OFF a pedale integrato nel carrello.

Semplicità sofisticata

Medela ha sviluppato la pompa di aspirazione Dominant Flex per essere tanto facile da usare quanto versatile. Il vacuometro di grandi dimensioni è facile da leggere con una rapida occhiata. Il regolatore del vuoto a membrana facile da azionare aiuta a impostare livelli di vuoto precisi. Con i pulsanti CleanTouch, la portata può essere variata con un semplice tocco. La pompa è disponibile in versione da rastrelliera, portatile o mobile per soddisfare le esigenze dell'ambiente clinico. Il sistema di raccolta monouso o riutilizzabile di Medela è progettato specificamente per essere compatibile e funzionale con le pompe di aspirazione Medela.



Variazione di portata con un solo tocco



Alta qualità, lunga durata dei componenti



Igienica grazie alla struttura intelligente



L'affidabilità incontra la tecnologia moderna

Vantaggi

- Dominant Flex è la prima pompa di aspirazione Medela con portata adattabile, che permette di creare il vuoto più velocemente o di avere un funzionamento più silenzioso.
- Il nostro processo svizzero di sviluppo e produzione offre una precisione meccanica che garantisce prestazioni eccellenti.
- Affidabilità grazie a più di 50 anni di esperienza adattati alle esigenze moderne.
- L'interno semplificato della pompa riduce la manutenzione.
- Facile da utilizzare grazie al design intelligente e all'ampia gamma di accessori compatibili.
- Garanzia di 5 anni.

Accessori

Sistema di raccolta monouso

Cartucce monouso e contenitori riutilizzabili in polycarbonato garantiscono una gestione semplice, pulita ed efficace dei fluidi. Misure: 1,5 e 2,5 litri.



Gamma di tubi

In silicone o PVC.



Sistema di raccolta riutilizzabile

I contenitori e coperchi in polisulfone trattabili in autoclave consentono la raccolta delle secrezioni in modo semplice ed economico.

Misure: 1, 2, 3 e 5 litri.



Regolatore del vuoto a pedale per regolare il vuoto a mani libere

Può essere collegato ai contenitori per aspirazione Medela standard.



Gamma di filtri

Per proteggere la pompa dal traboccamento, proteggere l'ambiente dai batteri e neutralizzare gli odori.



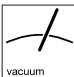


Interruttore ON/OFF a pedale

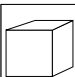

Lunghezza del cavo: 3,5 m.



Affiancate alla vostra pompa Dominant Flex gli accessori Medela per una flessibilità e facilità d'uso ancora maggiori.

Dati tecnici

	Vuoto massimo - 95 kPa - 713 mmHg
	Portata massima 40 l/minuto. 50 l/minuto. 60 l/minuto.
	9,3 kg (versione per rastrelliera)

	A x L x P (versione per rastrelliera) 210 x 305 x 375 mm
	Alimentazione di corrente 100-240 V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/CEE), IIa Garanzia di 5 anni	
		
		IP21

Tecnologia per il vuoto a uso medico per i professionisti sanitari

Per informazioni dettagliate, contattateci o contattate il rappresentante Medela locale.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Svizzera
www.medela.com

Contatti locali:

Medela Italia Srl
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch