

Rev. 00
Giugno 2015

 **RehaMED**

Scheda tecnica

TAURUS IV

KIT ANTIDECUBITO COMPLETO DI
COMPRESSORE E SOVRAMATERASSO

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali

Codice	Descrizione
AK-906	Kit antidecubito TAURUS IV completo di compressore con regolatore e sovrasmaterasso a elementi intercambiabili
AK-906C	Compressore con regolatore
AK-906M	Materasso ad elementi intercambiabili

Indicazioni	
Produttore	Intermed Srl
CND	Y033306 (AK-906 e AK-906M) Y033399 (AK-906C)
Repertorio	1307596/R (AK-906) 1307615/R (AK-906C) 1307713/R (AK-906M)
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Kit composti da compressore con regolatore TAURUS IV, sovrasmaterasso a 18 elementi intercambiabili con cinghie di fissaggio, telo di copertura a cerniera su tre lati, tubi a tre vie con connettori CPC per il gonfiaggio e sistema CPR per procedure d'emergenza.



1. Tasto di accensione [Power]
2. Regolatore della pressione di lavoro
3. Indicatore pressione normale
4. Indicatore bassa pressione
5. Tasto spegnimento allarme
6. Tasto Funzione statica [Statico]

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Compressore - Codice: AK-906C	Materasso - Codice: AK-906M
Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz, 1 A	Dimensioni: 198 x 88 x 11 cm Portata 160 kg
Portata d'aria: 7-8 litri al minuto	Valvola CPR
Pressione: 30-60 mmHg	Funzione cuscino
Ciclo lavoro: 12 minuti	Connettori a sgancio rapido
Avvisi: bassa pressione pressione normale	Con perdita d'aria
Modalità allarme silenziato	18 elementi
Modalità statica	Fodera: Blu in Nylon/PU
Dimensioni: 28 x 20 x 10 cm	Elementi in Nylon/PVC
Peso: 2,2 kg	Base: Nylon / PVC

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere posizionato il sovr materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142