

VALLETTA
SEDIA DA TRASPORTO IN ALLUMINIO

Codice	Descrizione
VALLETTA	Sedia da trasporto in alluminio

Descrizione

Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il minimo ingombro in condizione di chiusura e le ridotte dimensioni conferiscono al dispositivo estrema versatilità pur garantendo il massimo comfort per l'utente.

- Seduta e schienale in nylon.
- Braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA.
- Cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti.
- Pedane poggipiedi ribaltabili.
- Freni di stazionamento indipendenti.
- Barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

Dati tecnici

Larghezza totale	49 cm
Larghezza utile	38 cm
Larghezza seduta	31 cm
Profondità seduta	32 cm
Altezza seduta da terra	41 cm
Lunghezza massima	78 cm escluse pedane
Peso	6,80 kg
Portata massima	80 kg

**Materiali componenti**

Telaio, braccioli e pedane	Alluminio
Imbottitura braccioli	EVA
Imbottitura barra acc.	EVA
Cintura di sicurezza	Nylon
Seduta e schienale	Nylon
Ruote	PVC

Manutenzione e pulizia

Effettuare controlli periodici per mantenere l'efficienza della sedia da trasferimento e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

- Freni Verificare eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
- Tele Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
- Ruote Verificare periodicamente lo stato di usura delle coperture in PVC. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente.
- Braccioli Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
- Poggipiedi Verificare che la pedana non presenti rotture e che sia ben fissata al telaio.
- Bulloneria Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.
- Cintura Verificare la tenuta e il corretto fissaggio alla struttura.
- Pulire attentamente le parti soggette ad accumulare sporco e polvere come i perni delle ruote, il blocco freni e la bulloneria. Utilizzare panno morbido e detersivi non aggressivi.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2012

VALLETTA SEDIA DA TRASPORTO IN ALLUMINIO

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND Y122199
Progressivo di registrazione 604867

Produttore INTERMED Srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE